

Specifiche Tecniche Termometro per temperatura corporea ARW-TF600

Campo di misura	32.0°C ÷ 42.9°C/89.6°F ÷ 109.2°F
Risoluzione	0.1°C/0.1°F
Precisione di base ASTM E1965-1998 (2003)	30 ÷ 34.9°C (±0.3°C) 35 ÷ 42°C (±0.2°C) 42.1 ÷ 42.5°C (±0.3°C)
Distanza di misura	3-5cm
Tempo di risposta	0.5 secondi
Temperatura di funzionamento	16-35 ° C / 60.8-95 ° F
Temperatura di stoccaggio	0-55 ° C / 32-131 ° F
Umidità relativa	≤90%
Alimentazione	Batterie 2x1.5 V "AAA"
Dimensioni	101x40x143mm
Contenuto del pacco	- 1 x termometro a infrarossi - 1 x manuale utente inglese - 1 x scatola al dettaglio



Green Backlight
(32-37.3 °C)
normal



Orange Backlight
(37.3-38 °C)
low fever



Red Backlight
(>38 °C)
high fever

Siamo qui per aiutarti

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto migliore per la tua lavorazione?

Disponiamo di tecnici ed un furgone attrezzato, contattaci se stai cercando un prodotto, un suggerimento tecnico o applicativo o se vuoi una prova gratuita

Chiales Tools & Project S.r.l.

Via Giovanni Schiaparelli n°16

10148 Torino

Tel. 011.19444021 – Fax 011.194440115

info@chialestools.com

www.chialestools.com



Presenta:

TERMOMETRO INFRAROSSI C626ADM



Misurazione Senza contatto per evitare contaminazione batterica

Unità di misura °C e °F commutabile

Misurazione Senza contatto per evitare contaminazione batterica

Tempo di risposta immediato, 0,5 secondi

Display LCD retroilluminato a 3 colori in MODALITÀ corpo

Termometro ad infrarossi frontale clinici senza contatto C626ADM

Termometro portatile ad infrarossi senza contatto per la misurazione della temperatura corporea e degli stati febbrili, utilizzabile sia su adulti che su bambini

*** CE 、 FCC 、 Certificazione RoHS**

Attenzione:

Il sensore del termometro è estremamente sensibile. Qualsiasi sporco o olio impedirà una misurazione accurata. Controllare e pulire il sensore regolarmente. La superficie deve essere riflettente e brillante. Se è opaco e poco brillante, si prega di pulire il sensore con un batuffolo di cotone (preferibilmente imbevuto di alcool).



Il dispositivo è composto principalmente da raggi infrarossi, uno schermo LCD, tasti, un impugnatura, batteria ed una scheda

- 1.Sensore ad infrarossi
- 2.Display a cristalli liquidi (LCD)
- 3.Accensione
- 4.Impostazione segnale acustico
- 5.Tasto modalità
- 6.Coperchio vano batterie
- 7.Impugnatura



I termometri consegnati sono già stati tutti settati, sono corredati di pile e pronti all'uso. NON SONO STATI GIÀ UTILIZZATI, ma sono solo testati e forniti PRONTI ALL'USO.

Sfondo verde.

Modalità normale:

Temperatura corporea compresa 32°C – 37°C

Sfondo Arancione.

Lieve febbre:

Temperatura corporea compresa 37,4°C – 37,9°C

Sfondo Rosso.

Febbre alta:

Temperatura corporea compresa 38,4°C – 42,5°C

Dichiarazione legale:

Questo prodotto non è destinato a sostituire la consulenza fornita da un medico, un farmacista o altro professionista sanitario autorizzato.

Contattare immediatamente il proprio medico se si sospetta di avere un problema medico. L'imballaggio e i materiali effettivi del prodotto possono contenere informazioni più e diverse rispetto a quelle mostrate sul nostro sito Web. Si consiglia di non fare affidamento esclusivamente sulle informazioni presentate e di leggere sempre etichette, avvertenze e istruzioni prima di utilizzare o consumare un prodotto.

Il termometro a infrarossi frontale senza contatto è appositamente progettato per misurare la temperatura corporea di una persona indipendentemente dalla temperatura ambiente.